

キセノンランプの交換



警告！

キセノンランプの交換は、その手順を熟知した者のみが行うようにしてください。

扱いに慣れてないと、火傷やけがをする恐れがあります。


次の点に注意して、キセノンランプを交換してください。

- メイン電源スイッチを切ります。
- 完全にランプモジュールが冷却した後に、キセノンランプを交換します。
- ボタン（1）を押すと、ランプモジュールが少し飛び出します。
- ランプモジュールが止まるまで引き出します。
- ケース（2）をランプモジュールに覆うようにスライドさせ、ネジ（3）を（4）に固定させる。この状態でロックストッパーは解除されます。
- 古いランプモジュールを取り出し、これまでと逆の手順で新しいランプモジュールと交換します。




メモ：

- キセノンランプを交換するときは、ケース（2）を必ず使用してください。

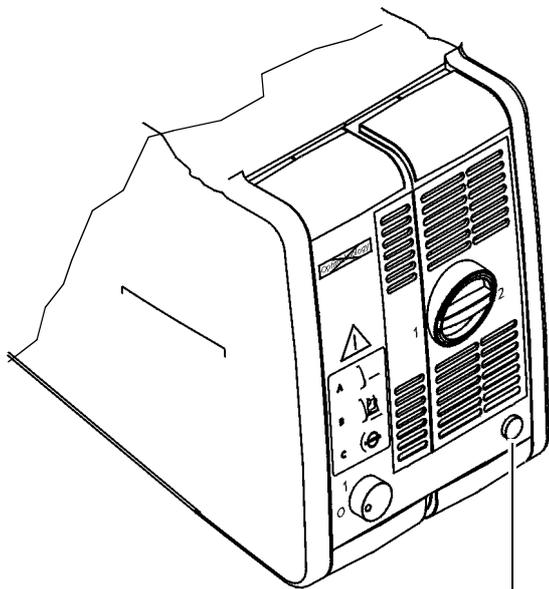

1

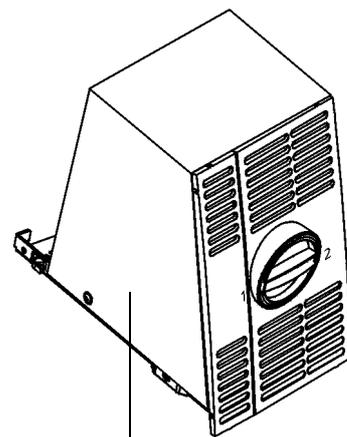

5

2

3

4

