

ハロゲンランプの交換



警告!

ランプが切れた直後にランプを交換する場合、ランプ自体が非常に高温なため、熱保護用手袋を着用して、熱傷防止に努めてください。

- ボタン (3) を回転して照明を切り、更に本装置の電源を切ります。
- ボタン (2) を押すと、ランプモジュールが少し飛び出します。ランプモジュールを完全に取り外します。
- 切れたハロゲンランプをスプリングホルダーから取り外します。
- ハロゲンランプのコンタクトピンをセラミックマウント (8) から抜き取ります。

