

## ハロゲンランプの交換方法



### 警告!

ランプが切れた直後はランプがとても熱くなっています。ランプに触れるときは、火傷防止のため手袋等を着用してください。



### メモ:

手術前には必ず、全てのハロゲンランプ (3,4) が正しく照明するか確認するように心がけてください。またバックアップ用ランプも格納されていることを確認してください。

ハロゲンランプを交換する手順:

- メイン電源スイッチを切ります。
- ボタン (2) を押すと、ランプモジュール (1) が少し飛び出します。その後ランプモジュールを完全に取り出します。
- スプリングベースから、切れたハロゲンランプを外します。

