

キセノンランプが点灯しないとき



注意:

換気口は決して塞がないでください。特にドレープが換気口に掛かっていないことを確認してください。換気口が塞がれていると加熱の原因となり、照明が点灯しなくなることがあります。

バックアップランプへの切り替え

●バックアップランプへ切り替える前に、システムのメイン電源スイッチを切ります。

ランプモジュールには2個のキセノンランプが格納されており、通常メインキセノンランプが点灯しなくなった場合、もう一方のキセノンランプへ切り替えて使用します。

●ボタン(3)を押すと、ランプモジュールが少し飛び出します。

●ランプモジュールを止まるまで引き出します。

●ノブ(1)を180°回転させ、バックアップのキセノンランプに切り替えます。

●ランプモジュールをランプハウスに押し込みます。

●システムのメイン電源スイッチを入れます。

メモ:

メインランプが切れ、バックアップランプを使用するときは、ランプ切れの再発に備え、予備のバックアップランプモジュールと直ちに交換できるように用意してください。



