

## ハロゲンランプの交換



### 警告:

ランプが切れた直後はランプが高熱を帯びています。ランプ切れ直後のランプの交換には熱保護用の手袋等を着用して、交換してください。

- 電源スイッチで懸架装置の電源を切ります。
- ボタン (3) を押します。ランプ・モジュール (2) がわずかに飛び出します。飛び出した後、ランプ・モジュールを引き出します。
- ボタン (1) を押します。ランプ・モジュールの中のランプ・ホルダーが開きます。
- 不良のランプをホルダーから外します。
- ハロゲンランプをセラミックベース (9) から外します。

