

ZEISS IOLMaster 5.5 / IOLMaster 500 セキュリティアップデート (“PrintNightmare”)



ZEISS IOLMaster 5.5 / IOLMaster 500 セキュリティアップデート（“PrintNightmare”）

ご注意ください：本書類は、機器に付属のユーザーマニュアルに代わるものではありません。

アップデートに関して

"PrintNightmare"は、Microsoft Windows OSで動作する機器に影響を与えるセキュリティの脆弱性の名称です。Microsoftによると、「Windows Print Spooler Serviceが特定の権限で不適切なファイル操作を実行すると、リモートデコードが実行される脆弱性が存在します。この脆弱性を悪用した攻撃者は、SYSTEM権限で任意のコードを実行する必要があります。攻撃者はプログラムをインストールし、データを表示、変更または削除し、あるいは無制限のユーザー権限で新しいアカウントをする可能性があります。」

"PrintNightmare"はZEISS IOLMaster 5.5 / IOLMaster 500のセキュリティや機能に影響を及ぼしません。それでもなお、機器のセキュリティアップデート（パッチ）を提供し、"PrintNightmare"のセキュリティの脆弱性を解消します。

必要な記憶媒体

アップデートをインストール前にダウンロードするためには、1 GB以上のUSBメモリスティックが必要です。

準備

- 次のファイルをダウンロードし、USBスティックのルートディレクトリに直接保存します：
- Zeiss-IOLMaster500-CVE-2021-34527-Patch.upt


ZEISS IOLMaster 5.5 / IOLMaster 500への アップデートのインストール方法

インストール方法は、使用しているOSにより本ガイドと若干異なる場合があります。本ガイドに記載されているインストールステップはWindows 10を搭載したシステム向けのものです。


アップデートのインストールには全部で約45分かかります。アップデートのインストール手順は次のとおりです：




1. IOLMasterから全てのUSBスティックを取り外します。
2. ソフトウェアアップデートが保存されているUSBスティックをIOLMasterに接続します。

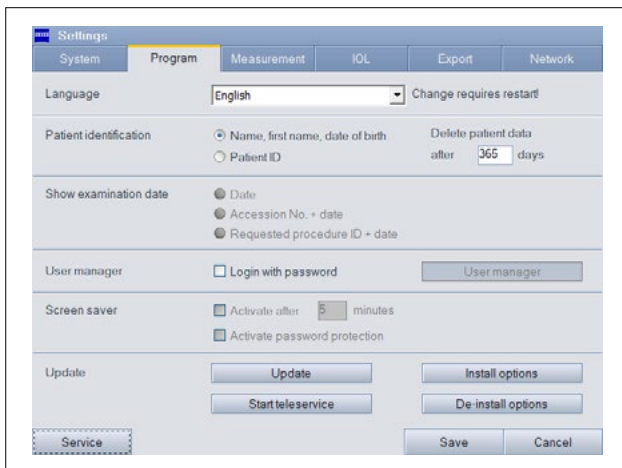

3. "Settings" > "Programs" > "Update" をクリックし、更新プロセスを開始します。

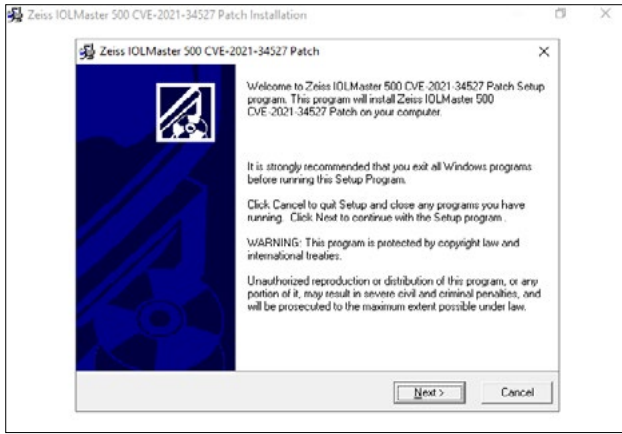


4. アップデートアシスタンスが開始します。これには最長3分かかります。ウィンドウが表示されたら"Next"をクリックします。

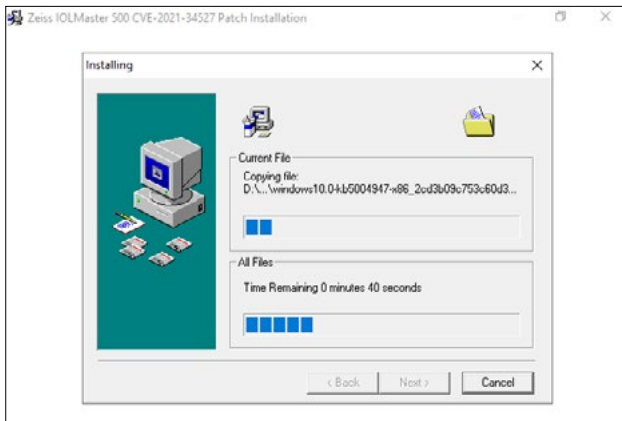


5. ファイルがコピーされます。この手順には最大3分かかります。


6. インストールの始めの部分が自動的に開始します。

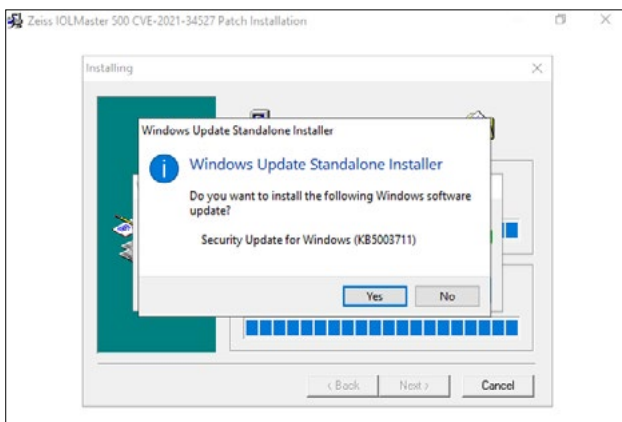

7. このダイアログウィンドウが表示されたら"Yes"をクリックします。

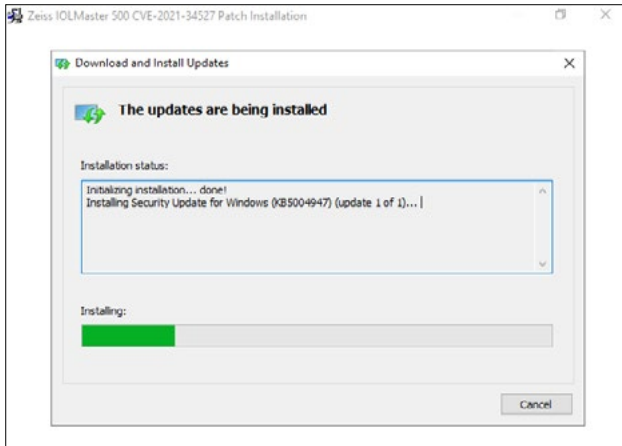


8. インストールは続行されます。

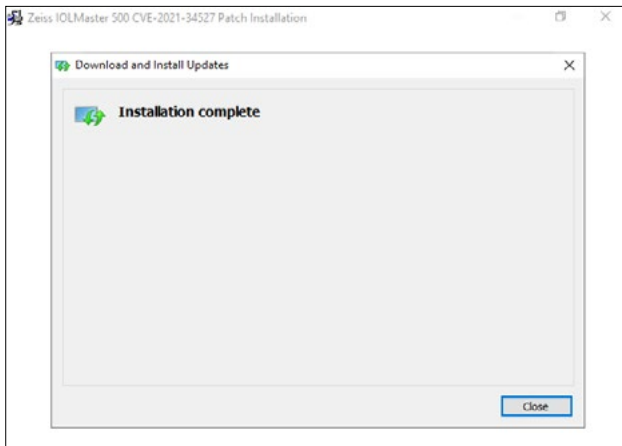


9. この手順が終了したら"Close"をクリックします。

10. 2番目のインストールが開始します。

11. 手順7~9を繰り返します。

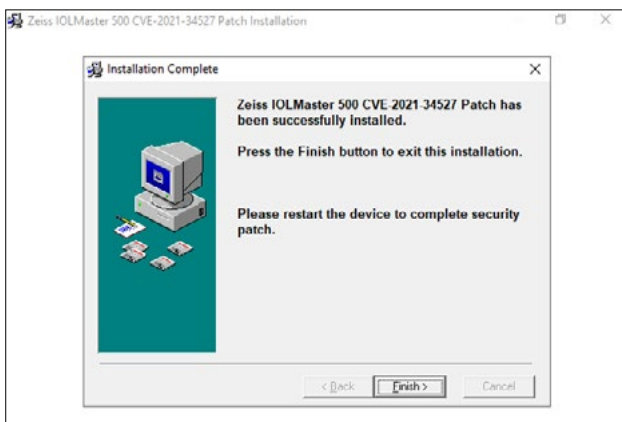


12. この2番目のインストールが終了したら、"Finish"ボタンをクリックします。

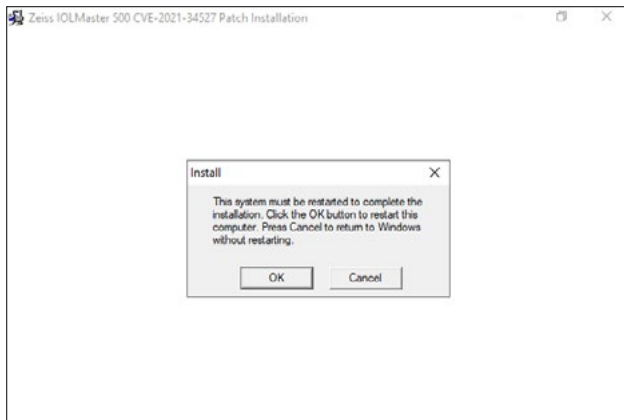

13. ソフトウェアアップデートは完了しました。
"OK"をクリックしてIOLMasterを再起動します。

14. 再起動完了には約10分かかります。

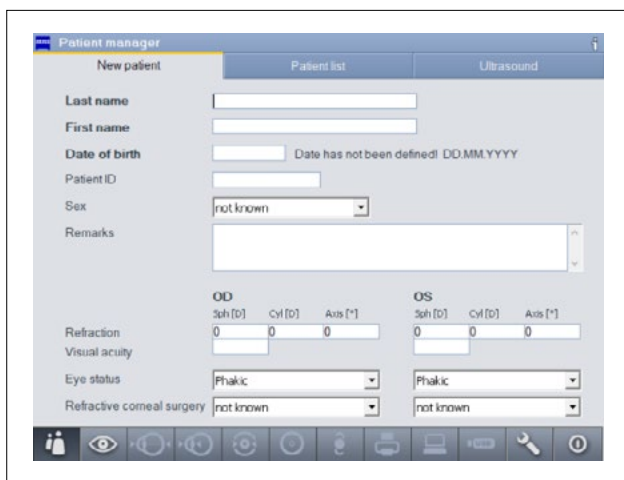

15. IOLMasterが再起動して"New Patient"ウィンドウが開くと、ソフトウェアアップデートは正常に完了したことになります。

16. USBスティックを取り外すことができます。

ZEISS製品インサイトで、さらに専門的な動画、ヘルプドキュメント、FAQを確認してください。



ZEISS製品インサイト-ウェブサイト



Carl Zeiss Meditec AG

Göschwitzer Strasse 51-52

07745 Jena, ドイツ

www.zeiss.com/med

info.meditec@zeiss.com

000000-1692-983-AddGA-JP-260821