

ライフスタイルとファッション 2017/10/16

黄色いレンズは人を幸せな気分にしますか？ 色つきレンズでより良い視力

▶ **色つきレンズ**があなたの生活を彩ります。色つきレンズの利点はなんでしょうか？最も良いのはどの色で、最近のファッショントレンドは何色ですか？この記事では、豊かな色彩を通して物を見ることの楽しさ、そしてあらゆる光と目の状態に最適なレンズの選び方を紹介します。

どんな色のレンズにもフィルター効果があります - 色合いとは関係ありません。ほとんどの人は、黄色いレンズは物をより明るく見せ、より良い気分させるという主観的印象を持っています。しかし客観的な立場から言うと、メガネによって明るさが変わるわけではありません。どんな色であるかにかかわらず、色つきレンズは光の全体的明度をカットします。ところが黄色いレンズは光の中の青い成分を大幅にカットするので、コントラストが強くなったような印象を与えるのです。しかし、この効果が得られるのは明るさが十分なときだけです。ですから夕暮れや暗闇ではこの効果はありません。ゴルフや熱心なスポーツ愛好家、射的をする人は雨の日や霧の中でターゲットをより鮮明に見分けるため、しばしば黄色いレンズを着用します。

バイクや自転車に乗るときは色の濃すぎるレンズを着用すべきではありません(カテゴリー4)。濃いレンズを着用すると光が3~8%カットされ、ブレーキ灯や赤信号に対する認識速度が遅くなるおそれがあります。

単一カラーに加え、イマージョン製法によって累進カラーのレンズも作られています。これらのレンズは上から下に向かって光のカット率が下がります。累進カラーレンズを使ったサングラスは、上と下で見かけの明るさが変化する環境で使用するのにとても便利です。そのため、バイクに乗る人の多くは累進カラーレンズを愛用します。コンソール上のディスプレイを見るときはレンズの下の色の薄い部分を通して見えますが、道路上のまぶしいライトはレンズの上の色の濃い部分を通して見ることができます。

調査によると、人によってはある色が許容できない場合があります。そこで色つきレンズを選ぶ時は、着用してみても本当に快適かどうか確かめることが重要です。眼鏡店の見せる色のサンプルを確かめてからお好きな色を選んでください。


▶ **偏光レンズ**はコントラストを強め、まぶしい光をカットするため、ウォータースポーツをする人やドライバーにとって特に便利です。

ユニークさを求める人へのお勧め商品 - Carl Zeissのファッションカラー：カリブ海、スカイブルー、ネオンライトなど幅広い色の範囲 - オレンジからブラウン、ナチュラルから迷彩色まで - 完璧なカラーがそろいました。

視覚プロフィールチェック

ご自分の視覚習慣を確かめ、最適なレンズソリューションを見つけましょう。

視覚プロフィールを今すぐチェック!

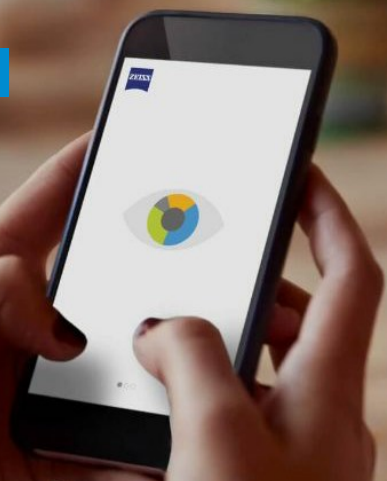

お近くのZEISS取扱店を探す

住所



関連記事



How sunglasses are made

What steps are included in the making of sunglasses? Learn what kind of materials are used to make sunglasses and how designers bring life to their ideas.

ライフスタイルとファッション 2018/07/03
タグ: サングラス



すばやく暗くなり すばやく元に戻る、モダンな調光レンズ。

晴れた屋外にしようと屋内にしようと、ZEISS PhotoFusionフォトクロミックレンズなら最適な視界を24時間楽しめます。

ライフスタイルとファッション 2017/11/24
タグ: サングラス



夏といえば、サングラス。この夏、サングラスを楽しむための10のヒント


ライフスタイルとファッション 2017/10/16
タグ: サングラス



目をくらませてはいけません。サングラスはファッションブルなアクセサリですが、さらに重要なのはサングラスが紫外線から目を保護するという点です。

ライフスタイルとファッション 2017/10/16
タグ: サングラス

関連製品

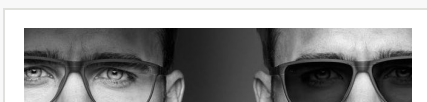



調光レンズ

あらゆる場面で使えるメガネ。

[詳細はこちらから](#)



サングラスカラー

あなたにとっての適切なカラーとは、どうやって決めるものなのでしょうか？

[詳細はこちらから](#)



サングラスレンズ

ひとつのレンズですべてのアウトドア活動に対応

[詳細はこちらから](#)



もっと見る

[視覚について理解する](#)

[健康と予防](#)

[ライフスタイルとファッション](#)

[運転とモビリティ](#)

[スポーツとレジャー](#)

[仕事](#)

最適なオプションを選ぶ

[遠用メガネおよび老眼用メガネ](#)

[遠近両用メガネ](#)

[サングラス](#)

[仕事用メガネ](#)

[スポーツメガネ](#)

[子供用メガネ](#)

[レンズコーティング](#)

[コンタクトレンズ](#)

[レンズクリーニング](#)

[眼鏡店に行く前に](#)

サービス

[視覚プロフィールチェック](#)

[オンラインビジョンチェック](#)

眼鏡店向け

[測定機器とテクノロジー](#)

[ZEISSメガネレンズ](#)

[ZEISSクリーニングソリューション](#)